



Rejuvenecimiento Facial

Esta presentación queda protegida por las leyes de propiedad intelectual, cuyo titular exclusivo es INDIBA, S.A.U. Únicamente está autorizado el uso de la misma a los profesionales titulares de los equipos. En consecuencia, queda prohibida su reproducción, modificación, distribución o transmisión, onerosa o gratuita, total o parcial, sin el permiso previo y por escrito de INDIBA, S.A.U. La vulneración será perseguida judicialmente.

INDIBA[®]
revitalizing lives

Proceso de envejecimiento de la piel



20 años

La gran producción de colágeno mantiene la piel firme y jugosa. Algunas arrugas dinámicas en ojos y mejillas son normales.



30 años

Tras los 20, los niveles de colágeno descienden un 1% anual. Las arrugas son más profundas y propensas a la decoloración y son susceptibles al daño ambiental.



40 años

La pérdida de volumen acentúa la flacidez. Las arrugas y el daño cutáneo son más profundos y difíciles de tratar.



50 años

El volumen de hueso y tejido se reduce, dejando más piel floja y con una apariencia "hueca"; la piel es propensa a sufrir daños.



60 años

Pérdida de volumen visible en los huesos y tejidos; la piel dañada y las arrugas estáticas pueden crear una apariencia de "rostro caído".

¿Qué es INDIBA?

Radiofrecuencia 448 kHz

La radiofrecuencia es un tipo de corriente electromagnética con efectos terapéuticos beneficiosos sobre los tejidos del organismo. Debido a estos efectos, es muy utilizado en tratamientos de belleza.

448 kHz es la frecuencia específica a la que trabaja INDIBA y la frecuencia a la que se generan beneficios a nivel celular, permitiendo una recuperación de tejidos más rápida y eficiente.

Para comprender mejor lo que hace INDIBA, mira este video:

[Tecnología INDIBA](#)



¿Cómo te puede ayudar la tecnología INDIBA?

La avalada tecnología INDIBA promueve la función celular saludable y la revitalización a través de la radiofrecuencia. INDIBA trabaja a una frecuencia específica de 448 kHz, lo que produce efectos térmicos y subtérmicos para lograr resultados desde la primera sesión.

El patentado Proionic® System utiliza tecnología capacitiva-resistiva (CAP-RES) para bioestimular, vascularizar e hiperactivar el tejido, generando una serie de beneficios clave:

BIOESTIMULACIÓN SUBTERMIA


Activa el metabolismo celular, incrementa la circulación sanguínea y activa los fibroblastos.

VASCULARIZACIÓN TERMIA

Dilata los vasos sanguíneos, incrementa la circulación, oxigena tejidos y células, incrementa el metabolismo celular y favorece el drenaje.

HIPERACTIVACIÓN HIPERTERMIA

Degrada los depósitos de grasa, detoxifica estimulando el drenaje de toxinas, incrementa el metabolismo celular y estimula la producción de colágeno y elastina.

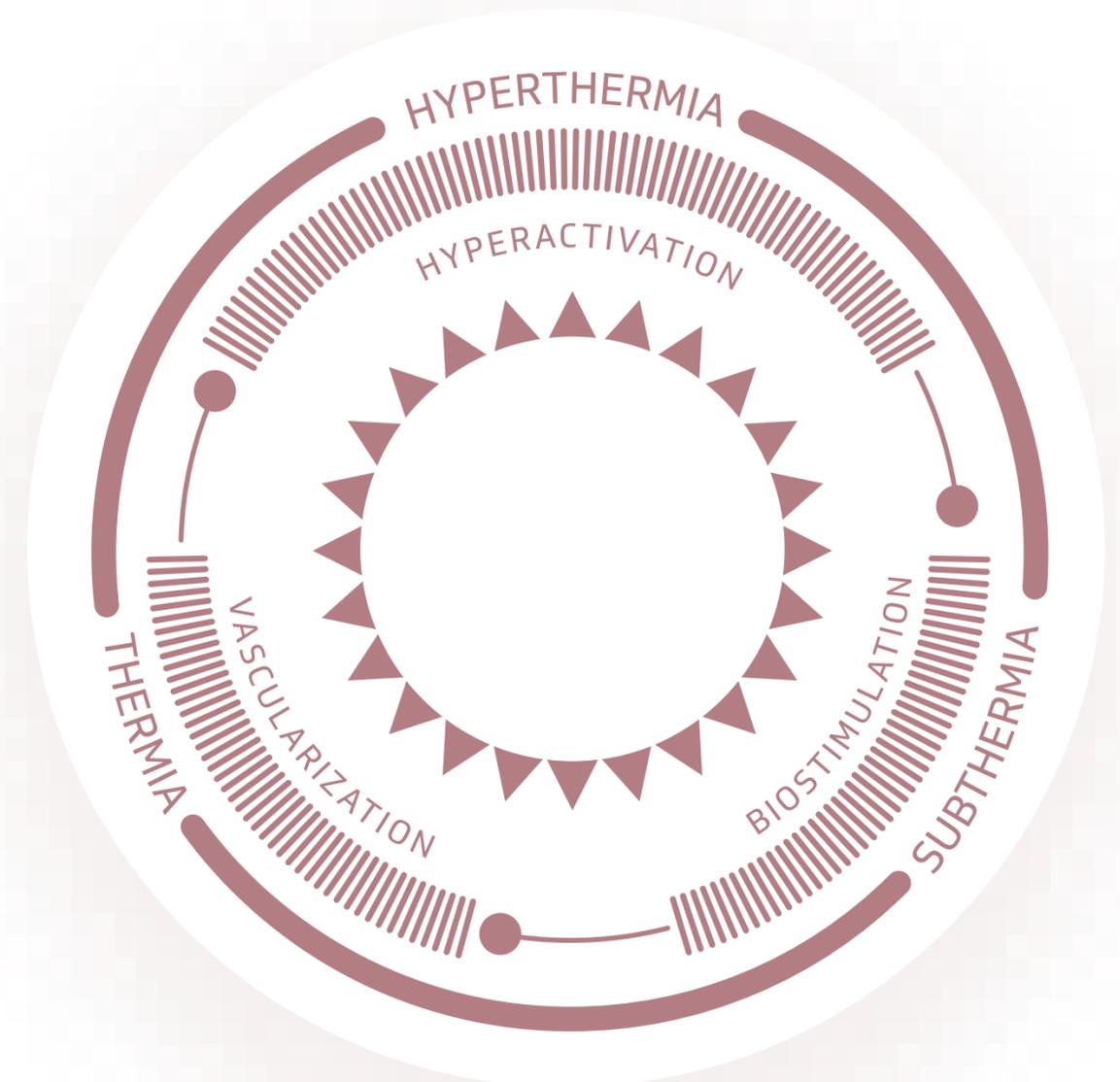


¿Qué beneficios tiene INDIBA en rejuvenecimiento facial?



Efecto tensor



Más colágeno y elastina

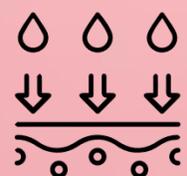

Hidrata la piel




Piel más oxigenada

Seguro y Agradable

No - invasivo

No - ablativo

INDIBA[®]
revitalizing lives

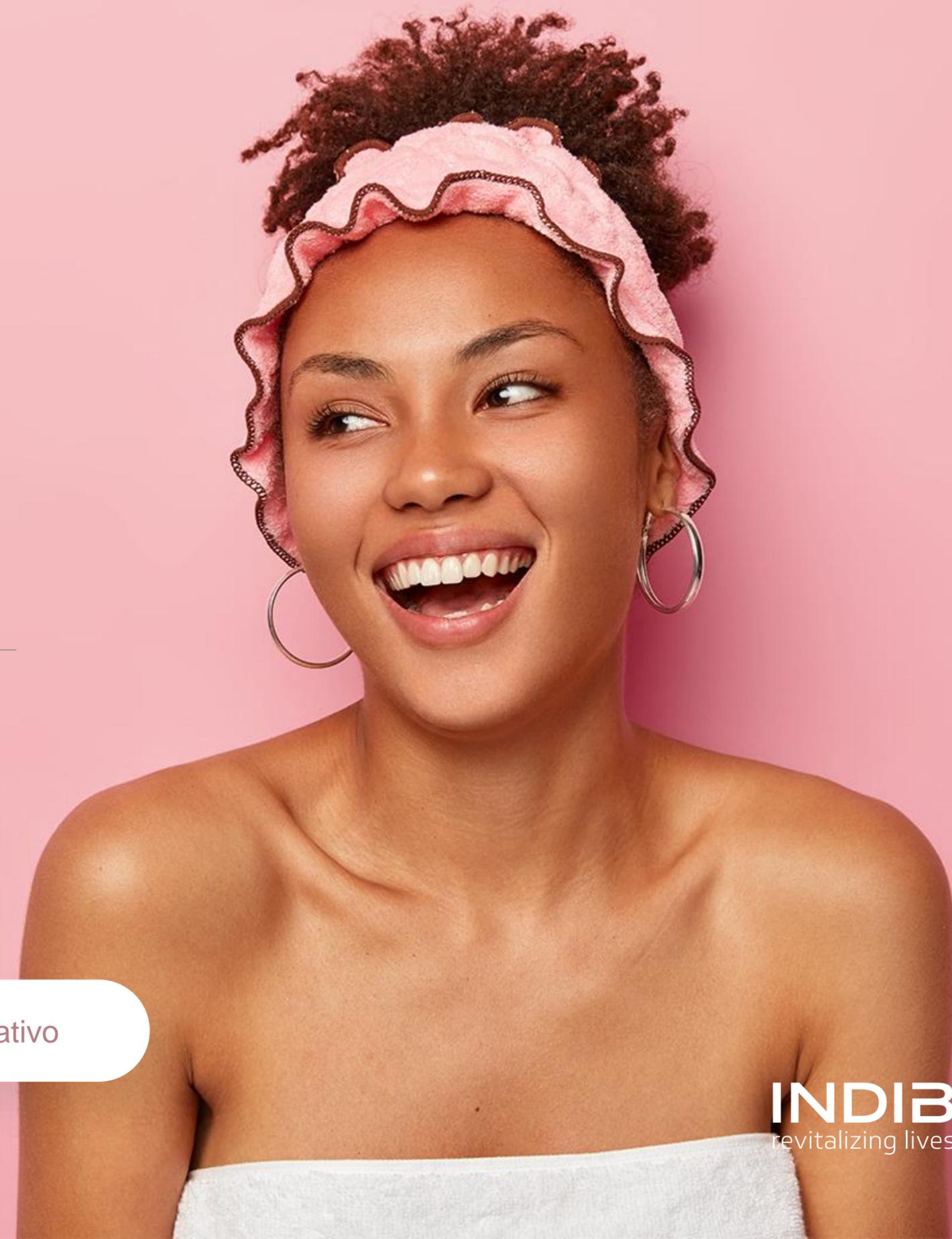



¿Qué sucede durante un tratamiento INDIBA?

- Te tumbará cómodamente en la camilla.
- El operador te pedirá que te quite todo el maquillaje y las joyas.
- Se aplicará una crema de tratamiento especial sobre el área a tratar.
- Luego recibirás un masaje relajante con el electrodo durante aproximadamente 20-30 minutos (dependiendo del área)
- Durante el tratamiento sentirás una agradable sensación de calor.
- Los tratamientos producen cero efectos secundarios y no requieren tiempo de inactividad.
- Una vez finalizado el tratamiento, podrás levantarse de la camilla y continuar con tu día.

Tu terapeuta te informará sobre el número de sesiones deseable para conseguir tu objetivo

Menciones en los medios

NUEVA
estética

VOGUE

iHOLA!

GLAMOUR

VIDA*Estética*
ESTÉTICA, HEALTHY LIFE & WELLNESS

BAZAAR^{Harpers}


les nouvelles
esthétiques

CLARA

Antes & Después

1 sesión


Cortesía de: Centro
María Cuevas
(España)

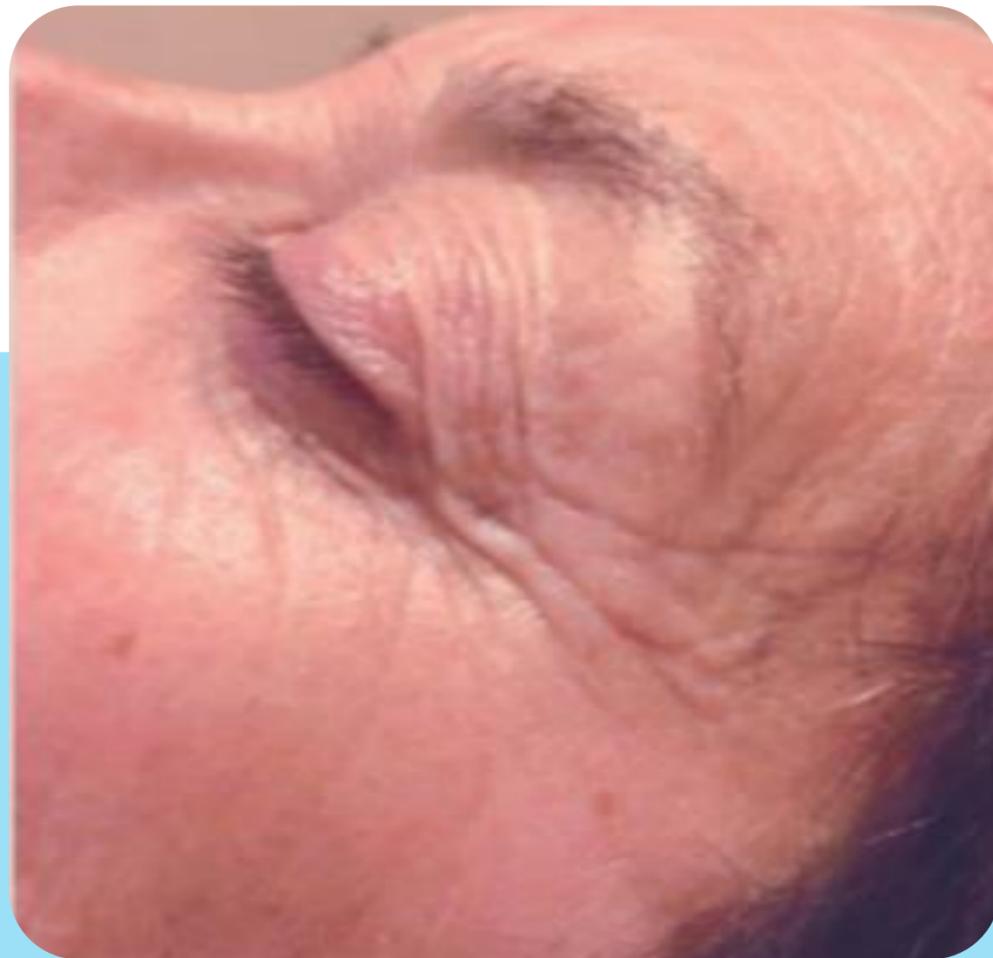

Antes & Después

2 sesiones


Cortesía de: INDIBA
France

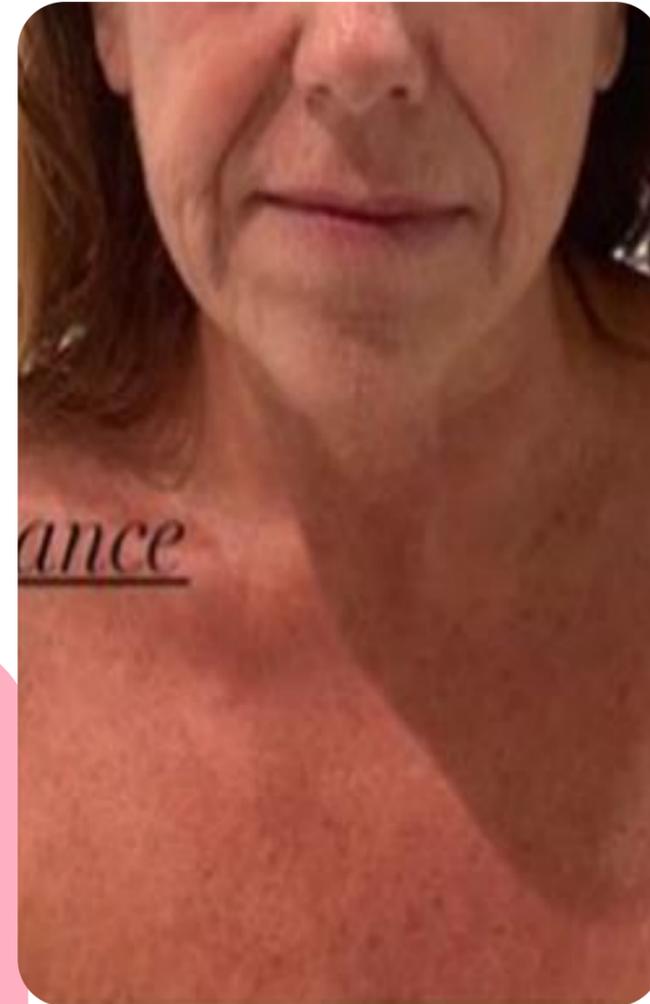

Antes & Después

12 sesiones

Cortesía de: INDIBA
France

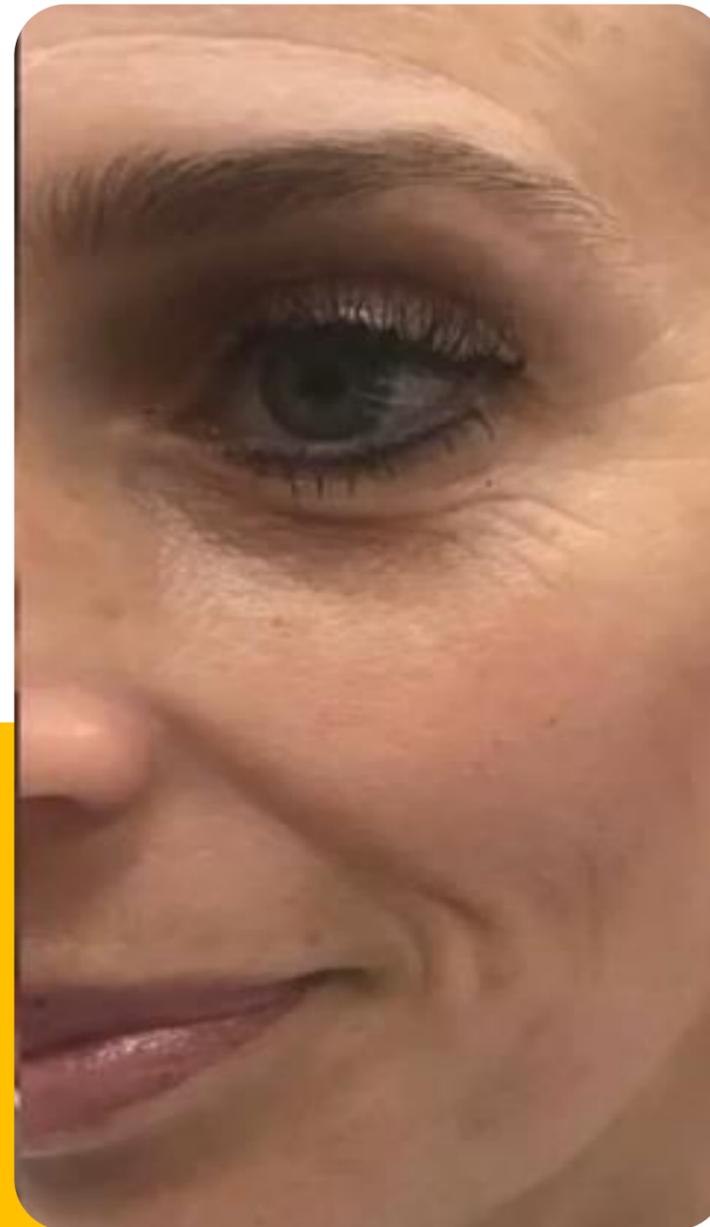

Antes & Después

1 session

Cortesía de: Centro María Cuevas (España)



Antes & Después

4 sesiones

Cortesía de: INDIBA Japón



Antes & Después

4 sesiones

Cortesía de: Salón de
belleza Enigma (España)

